



ARTIKELNUMMER: 254807

Kit für die panoptische Schnellfärbung für die klinische Diagnostik

TARIC 3822 00 00 00

PHYSIKALISCHE DATEN Flammpunkt: 12 °C •

GEBRAUCHSANWEISUNG: Den Blutaussstrich an der Luft trocknen lassen und 5x für je 1 Sekunde in die Fixierlösung (Panoptisch Nr. 1) tauchen. Überschüssige Flüssigkeit abtropfen lassen und den Objekträger 5x für je 1 Sekunde in die Eosin-Lösung (Panoptisch Nr. 2) eintauchen. Überschüssige Flüssigkeit abtropfen lassen und den Objekträger 5x für je 1 Sekunde in die Lösung Blau zur Schnellfärbung (Panoptisch Nr. 3) eintauchen. Das Präparat mit Puffer pH 7,2 solange spülen, bis keine Farbe mehr abgegeben wird und anschließend trocknen. Je nach Dicke des Präparates kann die Immersionszeit variiert werden.

Literatur

GEFÄHRLICHKEIT: Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H225 • H331 • H311 • H301 • H370 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P260 • P261 • P264 • P270 • P271 • P280 • P301+P310 • P302+P352 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P307+P311 • P311 • P312 • P321 • P322 • P330 • P361 • P363 • P370+P378 • P403+P233 • P403+P235 • P405 •

TRANSPORTBESTIMMUNGEN: UN: 1992 • ADR: 3(6.1)/II • IMDG: 3(6.1)/II • IATA: 3(6.1)/II • PAX: 352 • CAO: 364 • (D/E) •

SPEZIFIKATION:

Zusammensetzung:

253998 Blau zur Schnelfärbung (Panoptisch Nr. 3)

(1 x 500 ml)

253999 Eosin zur Schnelfärbung (Panoptisch Nr. 2)

(1 x 500 ml)

254101 Fixierer zur Schnelfärbung (Panoptisch Nr. 1)

(1 x 500 ml)

Ed.: 4 . Vig.: 11.12.2015 .

Prod.: 254807