



**ARTIKELNUMMER: 256649**

## **Gram-Hucker - Färbelösung (Tropfflasche) für die klinische Diagnostik**

---

TARIC 3822 00 00 00

**PHYSIKALISCHE DATEN** Flammpunkt: <10 °C (geschlossener Tiegel) •

**GEBRAUCHSANWEISUNG:** Ausstrich thermisch oder chemisch fixieren und für 1 Minute mit Kristallviolett-Oxalat-Lösung bedecken. Das Präparat anschließend mit deionisiertem Wasser spülen und mit Lugol's-Lösung für 1 Minute bedecken. Überschüssige Lösung mit deionisiertem Wasser abspülen und das Präparat tropfenweise mit Alkohol - Aceton (7:3) entfärben, bis keine Farbe mehr freigesetzt wird, jedoch nicht länger als 1 Minute. Das Präparat mit deionisiertem Wasser spülen (optional) und mit Safranin-Lösung für 1 Minute bedecken. Überschüssige Lösung mit deionisiertem Wasser abspülen und trocknen lassen.

**Literatur** Variables Influencing Results and the Precise Definition of steps in Gram staining as a means of standardizing the results obtained ; J.W.Bartholomew , Stain Technol. , 37 , 139-155 (1962) •

**GEFÄHRLICHKEIT:** Es stehen keine Daten zur Verfügung.



H: H225 • H319 • EUH066 • H336 • H412 •

P: P210 • P233 • P240 • P241 • P242 • P501 • P243 • P261 • P264 • P271 • P273 • P280 • P303+P361+P353 • P304+P340 • P305+P351+P338 • P312 • P337+P313 • P370+P378 • P403+P233 • P403+P235 • P405 •

**TRANSPORTBESTIMMUNGEN:** UN: 1993 • ADR: 3/II • IMDG: 3/II • IATA: 3/II • PAX: 305 • CAO: 307 • (D/E) •

**SPEZIFIKATION:**

Zusammensetzung:

1 x 250 ml Alkohol - Aceton 7 : 3

1 x 100 ml Lugol's - Lösung\*

1 x 100 ml Safranin - Lösung nach Gram-Hucker

1 x 100 ml Kristallviolett - Oxalat - Lösung nach Gram

- Hucker

1 Produktinformation

**\* Die Farbe des Gebindes kann sich mit der Zeit verändern. Dies hat keinen Einfluss auf die Färbungswirkung**

Ed.: 8 . Vig.: 14.02.2018 .

Prod.: 256649